


Medizinische Gesichtsmasken

Medizinprodukt, Synonyme: „OP-Maske“, „Mund-Nasen-Schutz“

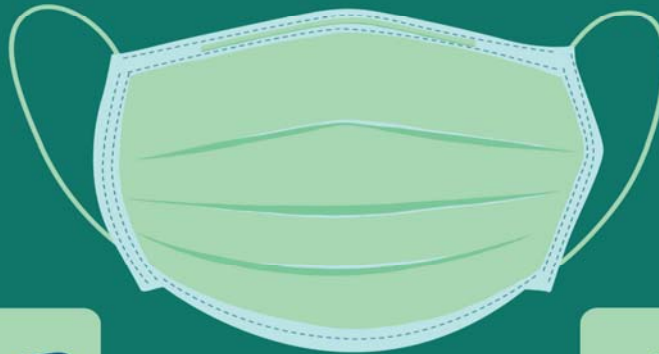

Schützt vor allem
andere (Fremdschutz).



CE-Kennzeichen auf Ver-
packung (neben Angaben
zum Hersteller) zeigt
Erfüllung gesetzlicher
Anforderungen.



Bietet auch einen
gewissen Eigenschutz.



Schützt vor Tröpfchen,
weniger vor Aerosolen.



Vom Hersteller als Ein-
wegprodukt vorgesehen.
Regelmäßig wechseln
und entsorgen!

Als Einwegprodukt ist die Nutzung für 8 h Gesamt vorgesehen, die aber auf mehrere Anwendungen und Tage aufgeteilt werden können.

Masken richtig nutzen



Vor und nach Auf-/Absetzen:
Hände waschen (mind. 20 Sek.
mit Seife) oder desinfizieren.



Über Mund, Nase und
Wangen platzieren – an
Rändern möglichst dicht
anliegend.



Bei Abnehmen und Entsorgen
an Bändern anfassen, nicht
Außenseite berühren.



Durchfeuchtete Masken bei
Raumtemperatur trocknen lassen,
weil höhere Temperaturen die
Vermehrung von Bakterien und
Schimmelpilzen anregen können.



Medizinische Gesichtsmaske
und Partikelfiltrierende Halb-
maske sind Einwegprodukte.



Alltagsmaske nach Abnehmen
in Beutel o. Ä. luftdicht ver-
schließen und, um Schimmel
zu vermeiden, oft waschen.



Waschen bei mind. 60°C voll-
ständig trocknen. Herstelleran-
weise (so vorhanden) beachten
zur max. Anzahl Waschungen
ohne Funktionsverlust.



Auch mit Maske Abstand zu
anderen Menschen: wo immer
möglich mind. 1,50 m.